

# „BabyFLEX“ Pavlik-Bandage Modell SOFT in 2 Varianten

## AIDAMED

Diagnostik - Therapie - Hygiene



### Indikation:

- Hüftluxation
- Hüftdysplasie

SOFT  
Schließen  
& Schuh



Arti-Nr:	Größe	Brustumfang
800-X0-Soft	X0	30-35 cm
800-00-Soft	0	35-40 cm
800-01-Soft	1	40-45 cm
800-02-Soft	2	45-55 cm

SOFT  
D-Ring  
& Schuh



Art-Nr:	Größe	Brustumfang
800-X0-D-Soft	X0	28-33 cm
800-00-D-Soft	0	33-38 cm
800-01-D-Soft	1	38-43 cm
800-02-D-Soft	2	45-55 cm

### Kontraindikation:

- nicht direkt auf verletzter, irritierter oder geschädigter Haut tragen



AIDAMED e. K.  
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg  
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11  
Fax: + 49 911 92 867 13  
www.aida-med.de

# „BabyFLEX

## Pavlik-Bandage


### Modell SOFT in 2 Varianten

**AIDAMED**  
Diagnostik - Therapie - Hygiene



#### Anwendung:

- Vor dem ersten Anlegen werden alle Schlieen und Haken von Brust-, (1) Schulter-(2), vordere- (3) und hintere Beingurten (4) geffnet.
- Das Kind auf dem Rucken auf der BabyFLEX - Pavlik Bandage legen, so dass der Brustgurt (1) einen Fingerbreit unterhalb der Achsel und noch oberhalb der Brust geschlossen werden kann.
- Die Schultergurte (2) im Rucken berkreuzen, an der **Schlieen** auf der Vorderseite befestigen, und die Langen anpassen.
- Die Beingurte(3) werden so angelegt, dass die Langsbander parallel zur beiden Seiten der Unterschenkelber dem inneren, und ueren Knchel verlaufen.
- Das um den Fuunterseite herum verlaufende Gurtteil, muss einige Zentimeter vor der Fersenhinterkante, Richtung Fumitze hin, positioniert sein.
- Die vorderen Beingurte (3), an der Innenseite verlaufend, werden so **an dem D-Ring** befestigt, dass ein Abspreizwinkel (Abduktion) der Oberschenkel in den Huftgelenken von 50°-55° je Beinseite entsteht.
- Die Befestigung der Beingurte muss vor der Achsellinie liegen.
- Nachfolgend werden die hinteren Beingurte (4), nach uen verlaufend, an der ruckenseiteigen **D-Ring** des Brustgurttes befestigt und angepasst.
- Die vorne-(3) und hinten-(4) verlaufenden Beingurte werden durch die zwei Verschlsse (5) oberhalb der Ferse und um den Unterschenkel fixiert. Um eine korrekten Sitz zu gewahrleisten, mssen diese Verschlsse nicht zu locker angelegt werden.

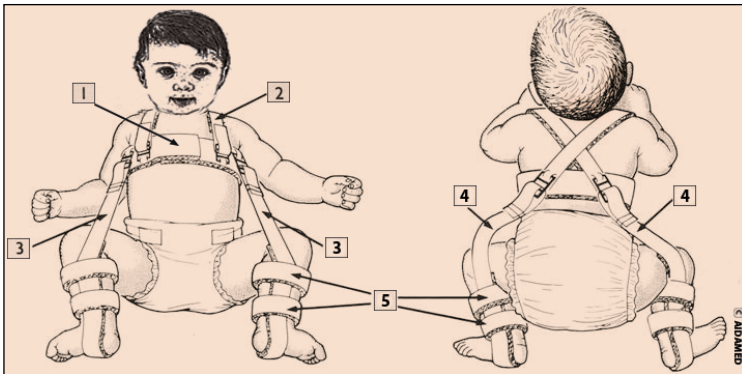

**BabyFLEX** - Pavlik-Bandage erfordert eine qualifizierte, individuelle und indikationsgerechte Anpassung an den Sugling durch entsprechendes ausgebildetes Fachpersonal.

#### Material

- Polster: PU- Schaum mit Charmeuse
- Klettverschlsse: Velcro
- Schlieen: Kunststoff, Metall
- Schuhe: Molton

#### Wichtig!

**KEIN WIEDEREINSATZ** - dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Suglings bestimmt!

#### Pflegeeigenschaften:

- **BabyFLEX**-Pavlik-Bandage lasst sich bei 30°C Feinwasche waschen.



**AIDAMED e. K.**  
Frbelstr. 10 - D-90489 Nurnberg  
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11  
Fax: + 49 911 92 867 13  
www.aida-med.de