

„BabyFLEX“

Pavlik-Bandage mit
variabler Abduktion
in zwei Modellen

AIDAMED

Diagnostik - Therapie - Hygiene



Indikation:

- Hüftluxation
- Hüftdysplasie



Standard
VARIABEL



Kontraindikation:

- nicht direkt auf verletzter, irritierter
oder Beschädigter Haut tragen

Art.-Nr:	Größe	Brustumfang
800-X0-Variabel	X0	30-35 cm
800-00-Variabel	0	35-40 cm
800-01-Variabel	1	40-45 cm
800-02-Variabel	2	45-55 cm

Art.-Nr:	Größe	Brustumfang
800-X0-VS	X0	30-35 cm
800-00-VS	0	35-40 cm
800-01-VS	1	40-45 cm
800-02-VS	2	45-55 cm

VARIABEL
mit
SCHUH



AIDAMED e. K.
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11
Fax: + 49 911 92 867 13
www.aida-med.de

„BabyFLEX“


Pavlik-Bandage mit variabler Abduktion in zwei Modellen

AIDAMED
Diagnostik - Therapie - Hygiene



Anwendung:

- Vor dem ersten Anlegen werden alle Schließen von Brust-, (1) Schulter-(2), vordere- (3) und hintere Beingurten (4) geöffnet.
- Das Kind auf dem Rücken auf der BabyFLEX - Pavlik Bandage legen, so dass der Brustgurt (1) einen Fingerbreit unterhalb der Achsel und noch oberhalb der Brust geschlossen werden kann.
- Die Schultergurte (2) im Rücken überkreuzen, an der **Abduktionsschließen** auf der Vorderseite befestigen, und die Längen anpassen.
- Die Beingurte(3) werden so angelegt, dass die Längsbänder parallel zur beiden Seiten der Unterschenkel über dem inneren, und äußeren Knöchel verlaufen.
- Das um den Fußunterseite herum verlaufende Gurtteil, muss einige Zentimeter vor der Fersenhinterkante, Richtung Fußmitte hin, positioniert sein.
- Die vorderen Beingurte (3), an der Innenseite verlaufend ,werden so am Brustgurt (**an der Abduktionsschließen**) befestigt, dass ein Abspreizwinkel (Abduktion) der Oberschenkel in den Hüftgelenken von 50°-55° je Beinseite entsteht.
- Die Befestigung der Beingurte muss vor der Achsellinie liegen.
- Nachfolgend werden die hinteren Beingurte (4), nach außen verlaufend, an der rückenseitigen Schließen des Brustgurt befestigt und angepasst.
- Die vorne-(3) und hinten-(4) verlaufenden Beingurte werden durch die zwei Verschlüsse (5) oberhalb der Ferse und um den Unterschenkel fixiert. Um eine korrekten Sitz zu gewährleisten, müssen diese Verschlüsse nicht zu locker angelegt werden.

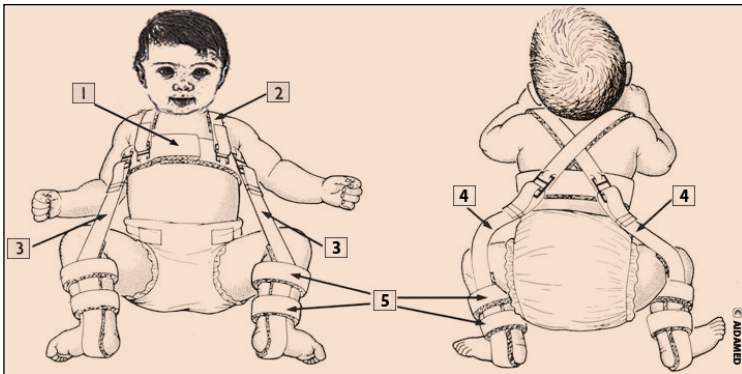

BabyFLEX - Pavlik-Bandage erfordert eine qualifizierte, individuelle und indikationsgerechte Anpassung an den Säugling durch entsprechendes ausgebildetes Fachpersonal.

Material

- Gurte: PP Gurtband,
- Polster: PU ; - Schuhe aus Molton
- Schaum mit Charmeuse
- Klettverschlüsse: Velcro
- Schließen: Kunststoff

Pflegeeigenschaften:

- **BabyFLEX**-Pavlik-Bandage lässt sich bei 30°C Feinwäsche waschen.

Wichtig!

KEIN WIEDEREINSATZ - dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Säuglings bestimmt!



AIDAMED e. K.
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11
Fax: + 49 911 92 867 13
www.aida-med.de