

Relexta Typ 1

Optimiertes Breitwickeln durch eine orthopädische - Spreizwindel

AIDA MED

Diagnostik - Therapie - Hygiene



Indikation:

Hüfttreifungsverzögerung Typ IIa nach Graf

"RELEXTA ist eine weiterentwickelte, orthopädische Abspreizwindel, welche die Ausreifung der Hüftgelenke beim Neugeborenen / Säugling unterstützt.

Relexta ersetzt gleichzeitig das breite Wickeln, und wird vom Hebammen und Kinderärzten generell empfohlen.

Größe	Abspreizung	Alter	PZN	Art.Nr.:
X0	10 cm	Für Frühgeborene	09634255	600-10-T1
0	12 cm	0 - 4 Wochen	09635214	600-12-T1
I	14 cm	4 - 8 Wochen	09635220	600-14-T1
II	16 cm	8 - 12 Wochen	09635237	600-16-T1



HMN: 05.05.01.0008



Typ 1
einfacher
Klettverschluss

Die Abspreizwindel / Breitwickelbandage sollte etwa so breit wie die Kniekehlen sein, wenn sich die Beine des Kindes in der Froschstellung (natürliche Stellung) befinden. Es wird empfohlen mit einem Lineal den Abstand zwischen den Innenseiten der Kniekehlen zu messen, wenn sich das Kind auf dem Rücken in seiner natürlichen Position befindet.



AIDAMED e. K.

Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11

Fax: + 49 911 92 867 13

www.aida-med.de

Relexta Typ 1

Optimiertes Breitwickeln durch eine orthopädische - Spreizwindel

AIDAMED
Diagnostik - Therapie - Hygiene



Liebe Eltern,

bei Ihrem Kind ist eine sogenannte „physiologische“ Hüftreifungsverzögerung (Typ IIa) im Rahmen der Ultraschalluntersuchung der Hüftgelenke festgestellt worden.

Bei ungefähr 30 % aller Neugeborenen fällt diese Hüftreifungsstörung beim Ultraschall auf.

Was aber bedeutet genau „physiologische“ Hüftreifungsverzögerung?

Es handelt sich hierbei lediglich um eine leichte Reifungsstörung der Hüftpfanne, welche den kindlichen knorpeligen Hüftkopf normalerweise knöchern gut übergreift.

Dies ist nicht besorgniserregend und durch den frühen Beginn einer entsprechenden Therapie in nahezu allen Fällen schnell zu beheben. Zur Unterstützung der Ausreifung ist es notwendig, die im mütterlichen Bauch innegehabte Beugstellung der Hüftgelenke durch eine vermehrte Abspreizung der Beinchen wieder herbeizuführen. Dadurch wird der Druck auf die Hüftpfanne vermindert und das Hüftgelenk kann gut ausreifen.

Durch den Einsatz der Abspreizwindel „Relexta“ geschieht dieses innerhalb der folgenden Lebenswochen.

Diese soll für 24 Stunden am Tag konsequent getragen werden.

Am Bauch angebrachte Klettverschlüsse sorgen für einfaches und sicheres Anlegen.

Bitte öffnen Sie die Klettverschlüsse nicht ruckartig, um ein Erschrecken des Säuglings zu vermeiden. Die Babyhaut ist zart und empfindlich, deshalb wird empfohlen die Abspreizwindel über den Strampler zu tragen.

Wichtiger Hinweis:

KEIN WIEDEREINSATZ - Dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.

„Relexta“
zeichnet
sich aus durch

- korrekte Beinstellung
- flexibel und leichte Handhabung
- ausreichende Starrheit für die Spreizstellung
- sehr bequem für Mutter und Kind
- hergestellt in Deutschland
- erprobtes Produkt
- rezeptierbar

„Produkt-
zusammen-
stellung

- Abspreizwindel:
- 100 % Polypropylene
 - waschbar in 40°

- Abspreizteil:
- 100 % PE-Platte
 - Wasserabweisend



AIDAMED e. K.
Fröbelstr. 10 - D-90489 Nürnberg
info@aida-med.de



Tel.: + 49 911 92 867 11
Fax: + 49 911 92 867 13
www.aida-med.de